

Användarmanual

AIR-SEAT Fläkt i formgjuten sits

Viktigt att tänka på!

Sätt inte igång fläkten då temperaturen är låg, då brukaren kan bli kall. Man får på inga villkor utsätta fläkt eller batteri för vatten (t.ex. vid rengöring). Om man behöver rengöra sitsen kan detta göras försiktigt med fuktig trasa så att man inte utsätter den monterade fläkten för fukt.

Batteri

Batteriet innehåller bla. bly, varför det ej får slängas i soporna då det är uttjänt utan lämnas till återvinning/ destruktion. Batteriet är uppladdningsbart och klarar av att återuppladdas med den medföljande laddaren.

Laddning av batteri

1. Anslut laddaren till vägguttag 230V, 50Hz.
2. Anslut laddkontakten till flätkåpan.
3. Kontrollera att den röda lampan tänds på laddaren, vilket indikerar att laddningen startat.
4. Låt batteriet vara anslutet tills lampan slocknat, vilket indikerar att laddningen är klar.
5. Ta ut nätsladden ur vägguttaget.
6. Koppla bort laddaren från flätkåpan.

Användning

Endast för laddning inomhus. Utsätt inte laddaren för regn.

Laddaren kan lämnas kvar inkopplad då den har inbyggt skydd mot överladdning och övergår till underhållsladdning då batteriet är full laddat.

Säkring

Det sitter en glassäkring på undersidan av flätkåpan.



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, tel. 011-16 18 00, fax 011-16 20 05

www.anatomicsitt.com

