

4:1 Underhåll/Skötselanvisning

Rengöring av chassit:

Rengör chassit regelbundet med bilschampo el. liknande. Vid kraftig nedsmutsning kan avfettningsmedel användas. !!!! (Tänk på miljön! Använd biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel).

4:2 Rekonditioneringsanvisning

Kontrollera alla rörliga delar med avseende på slitage. Byt vid behov. Se separat rekonditioneringsanvisning på www.anatomicsitt.com

4:3 Demontering/ skrotning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Metall = Ram, körbåge m.m.

Hårdplast = Hjul

Brännbart = Polstring

4:4 Märkning

Underredet är märkt med ett unikt serienummer som ska anges vid all korrespondens gällande produkten. CE-märkt.

4:5 Garanti

Underrede: 24 mån. garanti mot fabriktionsfel.

Lack: 12 mån. garanti mot fabriktionsfel.

Hjul: 12 mån. garanti mot fabriktionsfel.

4:6 Passande sittsystem

Zitzi Sharky, Anatomic Sits

4:6 Tekniska data

BRUKARDATA

Max belast. vikt: 110 kg

Hjul: 125 & 300 mm

Tilt bakåt, Max: 40°

Tilt framåt, Max: 10°

Lägsta sitthöjd: 225 mm

Högsta sitthöjd: 830 mm

Total längd: 850 mm

Total bredd: 630 mm

Total vikt: 37 kg



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, Tel: 011-16 18 00
Fax: 011-16 20 05, E-post: info@anatomicsitt.com



Sendersøvej 2-6, 8240 RISSKOV, Tel. 86- 17 01 74
Fax: 86- 17 01 75, E-mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.com

GRIZZLY

Art.nr. BR601-371, utgåva 1 - 2005-02-20



INNEHÅLL

2:1	Reglering sitthöjd & tilt	4:1	Underhåll/Skötselanvisning
3:1	Reglering av körbåge	4:2	Rekonditioneringsanvisning
3:2	Justering av bromsar	4:3	Demontering/ skrotning
		4:4	Märkning
		4:5	Garanti
		4:6	Passande sittsystem
		4:6	Tekniska data

Tillverkare: Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-600 06 NORRKÖPING
SWEDEN - Phone. +46 (0)11-16 18 00



www.anatomicsitt.com 

2:1 Reglering av sitthöjd & tilt

Sitthöjden är reglerbar mellan 25 cm - 83 cm.
Sitthöjden justeras med hjälp av handkontrollen



! *Var uppmärksam på ev. klämrisk*



- 1 Ner
- 2 Upp
- 3 Tilt framåt
- 4 Tilt bakåt



Sittplattan kan justeras 40 ° bakåt och 10 ° framåt.
Tiltning justeras med hjälp av handkontrollen

3:1 Reglering av körbåge

Justering av körbågens vinkel

Justering av körbågens höjd

Justering av körbågensvinkel



3:2 Justering av bromsar


Om bromsarna inte låser hjulen, gör nedanstående justering:

1 - Spänn justeringskruven. Test bromsförmågan.

Om det inte hjälper:

- 1 - Släppjusteringskruven så den är i botten.
- 2 - Lossa vajerlåset.
- 3 - Sträckuppvajern någon cm.
- 4 - Lås vajerlåset.
- 5 - Testa.

Om det inte hjälper, gör om proceduren.

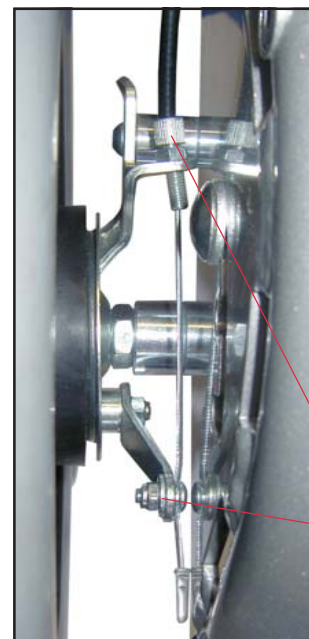

- 1 - Vajerlåsning
- 2 - Justeringskruv av broms