

BRUKSANVISNING

Air pad-kontakt

Art. 55604

Air-pad kontakt inkl.
monteringsarm & fäste.

Air pad-kontakten har ett vinyl membran som leder luft från kontaktdynan till kontaktboxen. Kontaktboxen innehåller själva brytkontakten. Kontaktdynan är helt vattentät och mycket hållbar. Den är speciellt användbar till brukare som aktiverar kontakten med grova rörelser eftersom den är mjuk mot huden. Airpad-kontakten kan med fördel även aktiveras av andra kroppsdelar, t.ex. foten eller handen.


*** Montering och justering av kontakten ska utföras av medicinskt / behörig personal.**

MONTERING:

- 1) Försäkra Dig om att huvudstödet är korrekt anpassat innan Du monterar kontakten. (Se separat bruksanvisning som medföljer huvudstödet.)
- 2) Montera kontakten på huvudstödet genom att skruva fast monteringsstaget på huvudstödet. Spectrum serie se bild 1. Anatomic huvudstöd se bild 2
- 3) Lossa insexskruvarna på kullleden vid monteringsstaget. Lossa även insexskruvarna vid kontakten. (Skruvorna ska lossas lagom mycket för att positionerna ska bibehållas men ändå vara lätta att justera med handen.)
- 4) Kontaktboxen monteras på lämplig plats med kardborre.
- 5) Sätt försiktigt brukaren i stolen. Justera in optimal position och lås alla skruvar.

TÄNK PÅ DETTA!

- * Air pad-kontakten har en 3,5 mm tele-plug och ska bara användas med låg volt, och låg ampere applikationer. Ingen hushållsström, (220 volt) får passera genom kontakten.
- * För att montera kontakten, följ denna bruksanvisning samt bruksanvisningen som följde huvudstödet.
- * Undvik att vika sladden 90° eller mer.
- * Eventuell överflödiga sladd får inte lindas ihop för tajt.
- * Se till att inte sladden sträcks för mycket.
- * Använd inte lösningsmedel för att rengöra kontakten.
- * Försök inte att öppna eller reparera kontakten.
- * Utsätt inte kontakten för extrem hetta eller kyla.
- * **Fortsätt kontinuerligt att observera brukaren efter installation och anpassning.**

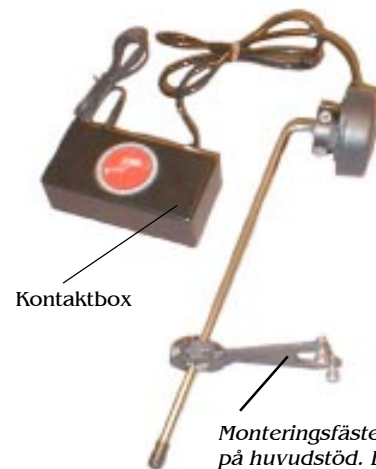

Kontaktbox

Monteringsfäste att montera på huvudstöd. Bilden visar art. 51431, fäste för Spectrum serie.


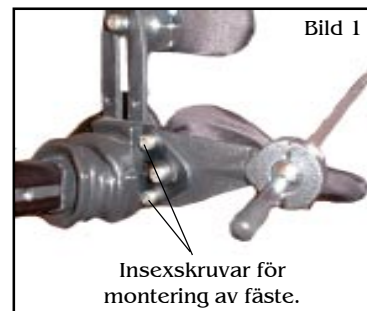


Bild 1

Insexskruvar för montering av fäste.

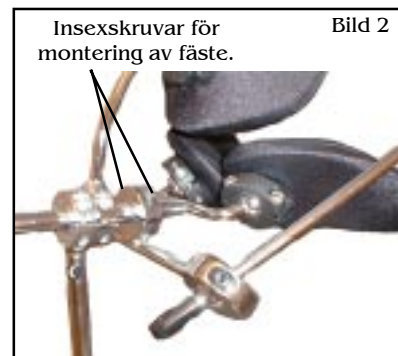

Insexskruvar för montering av fäste.

Bild 2

Tillbehör:

- * Art. 5211, Förlängningsstag, (Gör det möjligt att nå längre.)
- * Monteringsarmen finns som vikbar.

1 års garanti

Kontakten har noggrant testats och inspekterats innan den levererades till Dig. Kontakten har garanti mot fabriksfel gällande ett år från leveransdatum. Garantin är begränsad till reparation eller ersättning av delar och täcker inte ovarsamt handhavande. Skulle en komponent vara felaktig och felet kan härledas till garantin kommer vi att reparera eller byta ut den, fritt från betalning.

Tillverkare:
Whitmyer Biomechanix INC.
1833 Junwin Ct.
Tallahassee, Florida 32308
USA
Tfn. 001-850-656 9448



93/42/EEC



Postadress:

Box 6137
600 06 NORRKÖPING

Telefon:

011-16 18 00

Fax:

011-16 20 05

E-mail:

info@anatomicsitt.com

Internet:

www.anatomicsitt.com

