

BRUKSANVISNING

Wobble-kontakt, standard

Wobble-kontakt, standard är framtagen som ett tillbehör till Spectrum serie och Anatomic huvudstöd. Med kontakten kan Du aktivera leksaker, kommunikationsanordningar, datorer m.m. Kontakten aktiveras genom att kontaktarmen viks 25° - 50° från sitt ursprungsläge. Wobble kontakt, standard kan även med fördel aktiveras av t.ex. handen.

*** Montering och justering av kontakten ska utföras av medicinskt / behörig personal.**

MONTERING:


- 1) Försäkra Dig om att huvudstödet är korrekt anpassat innan Du monterar kontakten. (Se separat bruksanvisning som medföljer huvudstödet.)
- 2) Montera kontakten på huvudstödet genom att skruva fast monteringsstaget på huvudstödet. Spectrum serie se bild 1. Anatomic huvudstöd se bild 2
- 3) Lossa insexskruvarna på kullleden vid monteringsstaget. Lossa även insexskruvarna vid kontakten. (Skruvorna ska lossas lagom mycket för att positionerna ska bibehållas men ändå vara lätta att justera med handen.)
- 4) Sätt försiktigt brukaren i stolen. Justera in optimal position och lås alla skruvar.

TÄNK PÅ DETTA!



- * Wobble-kontakt, standard har en 3,5 mm tele-plug och ska bara användas med låg volt, och låg ampere applikationer. Ingen hushållsström, (220 volt) får passera genom kontakten.
- * För att montera kontakten, följ denna bruksanvisning samt bruksanvisningen som medföljde huvudstödet.
- * Undvik att vika sladden 90° eller mer.
- * Eventuell överflödig sladd får inte lindas ihop för tajt.
- * Se till att inte sladden sträcks för mycket.
- * Använd inte lösningsmedel för att rengöra kontakten.
- * Försök inte att öppna eller reparera kontakten.
- * Utsätt inte kontakten för extrem hetta eller kyla.
- * **Fortsätt kontinuerligt att observera brukaren efter installation och anpassning.**

Art. 55605

Wobble-kontakt, standard monteringsarm och fäste.

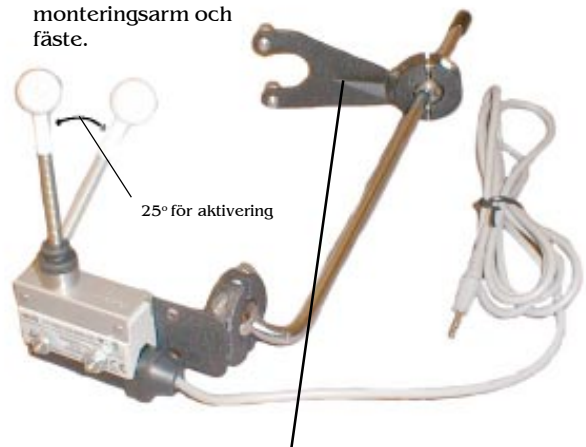

Monteringsstag att montera på huvudstöd. Bilden visar art. 51431, fäste för Spectrum serie.

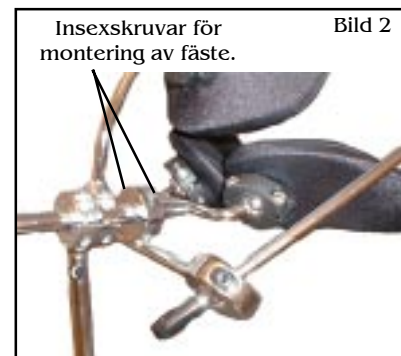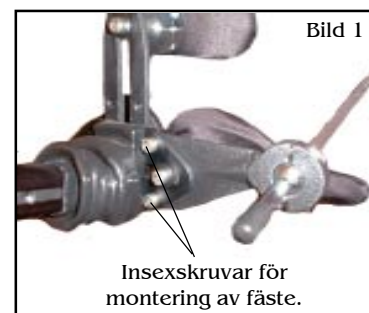

Tillbehör:

- * Art. 5211, Förlängningsstag, (Gör det möjligt att nå längre.)
- * Monteringsarmen finns som vikbar.

1 års garanti

Kontakten har noggrant testats och inspekterats innan den levererades till Dig. Kontakten har garanti mot fabriksfel gällande ett år från leveransdatum. Garantin är begränsad till reparation eller ersättning av delar och täcker inte ovarsamt handhavande. Skulle en komponent vara felaktig och felet kan härledas till garantin kommer vi att reparera eller byta ut den, fritt från betalning.

Tillverkare:
Whitmyer Biomechanix INC.
1833 Junwin Ct.
Tallahassee, Florida 32308
USA
Tfn. 0091-850-656 9448

