

4:1 Underhåll/Skötselanvisning

Rengöring av chassit:

Rengör chassit regelbundet med bilschampo el. liknande. Vid kraftig nedsmutsning kan avfettningsmedel användas. !!!! (Tänk på miljön! Använd biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel).

4:2 Rekonditioneringsanvisning

Kontrollera alla rörliga delar med avseende på slitage. Byt vid behov.

Se separat rekonditioneringsanvisning på www.anatomicsitt.com

4:3 Demontering/ Skrotning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Metall = Ram, körbåge m.m.

Hårdplast = Hjul

Brännbart = Polstring

4:4 Märkning

Underredet är märkt med ett unikt serienummer som ska anges vid all korrespondens gällande produkten. CE-märkt.

4:5 Garanti

Underrede: 24 mån. garanti mot fabriksfel.

Lack: 12 mån. garanti mot fabriksfel.

Hjul: 12 mån. garanti mot fabriksfel.

4:6 Passande sittsystem

Zitzi Delfi, Zitzi Sharky & Anatomic Sits

4:7 Tekniska data

Finns i två storlekar

Finns med gaskolv eller el.

Tilt sittethet, Gaskolv: +8° till -20°

Tilt sittethet, Manuell: +16° till -42°

Steglös sitthöjd: 45-55 cm / 46-56 cm

Hjul: 125 mm

Max. belastning: 85 kg



Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, Tel: 011-16 18 00
Fax: 011-16 20 05, E-post: info@anatomicsitt.com



Søndersøvej 2-6, 8240 RISSKOV, Tel. 86-17 01 74
Fax: 86-17 01 75, E-mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.com

Octopus

Art.nr. BR601-331, utgåva 1 - 2005-03-20



INNEHÅLL

- 2:1 Reglerbar sitthöjd - Gaskolv
- 2:2 Reglerbar sitthöjd - Ställdon
- 2:3 Tiltning av sittsystem
- 3:1 Montering/Justering körbåge
- 3:2 Montering av sittsystem
- 4:1 Underhåll/Skötselanvisning
- 4:2 Rekonditioneringsanvisning
- 4:3 Demontering/Skrotning
- 4:4 Märkning
- 4:5 Garanti
- 4:6 Passande sittsystem
- 4:7 Tekniska data

Tillverkare: Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-600 06 NORRKÖPING
SWEDEN - Phone. +46 (0)11-16 18 00



www.anatomicsitt.com



2:1 Reglerbar sitthöjd - Gaskolv

Sitthöjden är reglerbar mellan 25 cm - 63 cm.

Sitthöjden justeras med hjälp av ett trampstag, se bild nr. 1

Reglering av sitthöjd:

- * Frigör låsningen genom att trampa ned aktiveringsplattan.
- * Justera sedan sittsystemet till önskad höjd.
- * Ta sedan bort foten från tramröret för att låsa sitthöjden.




! Håll alltid en hand på sittsystemet vid justering. Var uppmärksam på ev. klämrisk

2:2 Reglerbar sitthöjd - Ställdon

Sitthöjden justeras med hjälp av handkontrollen

Reglering av sitthöjd:

- * Vänsterknappen - "höjer sittplattan"
- * Högerknappen - "sänker sittplattan"

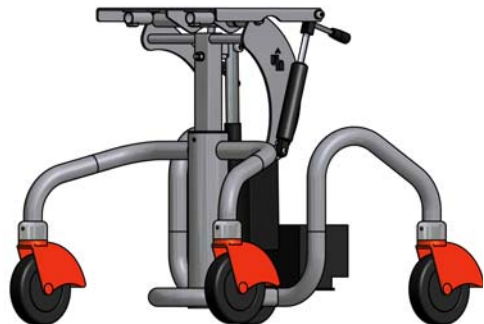

Före användning:

Om ett uppladdat batteri inte används under en längre tid kommer det att gradvis tappa sin lagrade energi. Därför rekommenderar vi att ladda batterierna minst 8 timmar före användning.

Ladda batteriet efter behov med tillhörande laddare (220 V).

Laddarens kontakt fästes i handkontrollen enl. bild.


3:1 Tiltning av sittsystem

Gaskolvstilt:

Justering av sittvinkel:

- * Släpp på vreden
- * Justera sittedelen via aktiveringsspaken.
- * Lås vreden

Aktiveringsspak

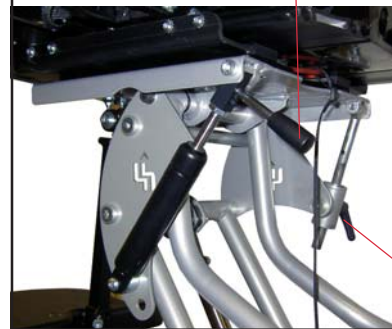

Manuell tilt:

Justering av sittvinkel:

- * Frigör låsningen genom att släppa på vreden.
- * Justera sedan sittsystemet till önskad vinkel.
- * Lås vreden



! Kontrollera att tiltningen är låst.

3:2 Montering av sittsystem

Sittsystemet monteras enkelt och säkert på underredet med hjälp av en fästplatta alt. adaptersystem.

Fästplatta används ihop med Zitzi Delfi samt Anatomic SITS.

Adaptersystemet ihop med Zitzi Sharky.

För montering, se resp. bruksanvisning för aktuellt sittsystem.

Skjut in sittsystemet, vrid in låsspaken tills det hörs ett "klick-ljud"



Bilden visar en Delfi & en fästplatta.