

## Monteringsanvisning

# Parkeringsbroms

1) För in distansarmen i skåran på bromsspaken. (se bild).  
Använd skruv D för att fixera den i bromsspaken




2) Sätt ihop ramfästet.  
Använd skruv C (se bild)  
Den stora öppningen skall fästas på ramen, den mindre skall hålla bromsen.

3) För in den ihopmonterade parkeringsbromsen i fästets mindre öppning.

4) Sätt fast bromsen på underredet i lagom avstånd så att det går att låsta hjulet. Se till att ramfäste A hamnar ytterst på ramen

5) Dra åt skruven.

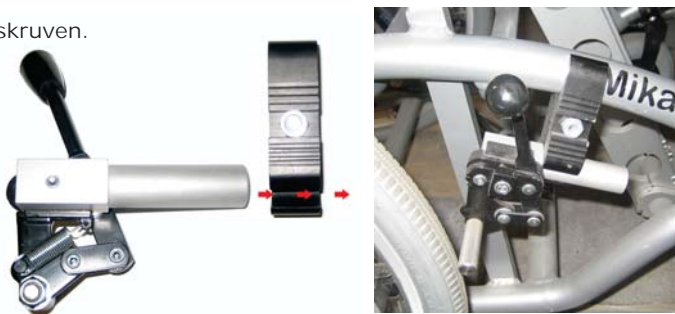

Innehåll:



## Mountin manual

# Parkingbrake

1) Merge the distance-arm with the brake (se picture).  
Use screw D to fixate.




2) Put together the frameholders.  
Use screw C (se picture)  
Big opening is to be mounted in the frame, the smaller holds the brakeknob.

3) Attach the assamble parkingbrake in the holder.

4) Attach the brake on the frame so it comes to a right distance from the wheel. Make sure that the frameholder A is outward on the frame.

5) Tighten the screw

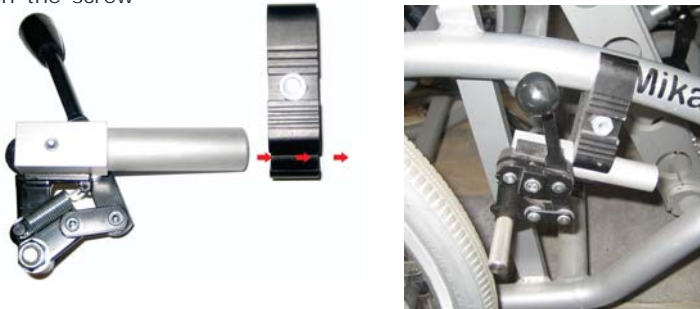

Content:

