



1. Knacka ut sprinten med hjälp av en gummihammare och skruvmejsel.
2. Dra sedan ur skruvmejseln när sprinten är utknackad.
3. Lyft bort den röda detaljen på bromshandtaget.
4. Lyft ur fjädern och vänd den åt motsatt håll mot vad den satt.
5. Korrekt håll för fjäder om parkeringsbromsfunktion önskas.
6. Var noga med att sätta fjäderns hål korrekt så du kan sätta tillbaka sprinten.
7. Sätt tillbaka den röda detaljen.
8. Knacka tillbaka sprinten igen.