

## Rekonditioneringsanvisning

För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert bör regelbunden underhåll/service utföras. Vi rekommenderar följande åtgärder.

"Stor service" - minst 1 gång per år. (Samtliga 16 punkter)

"Funktionskontroll" - Varje gång underredet skall brukas. (Punkt: 3, 5, 7, 12, 13)

Behovet skiftar och måste bedömas från fall till fall.

Arbetet ska utföras av kompetent personal.

### 1 Rengöring

Lackerade ytor, hjul och handtag rengörs med vanligt rengöringsmedel, utan lösningsmedel. OBS! Använd INTE lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

### 2 Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshålerna blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja.

### 3 Reflexer

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

### 4 CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

### 5 Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt (och utan oljud). Max 2 bars tryck i luftpumpade hjul.

### 6 Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Anatomic SITT AB.



### 7 Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

### 8 Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras.

### 9 Smörjning

Grindbussningar och gångjärn ska fungera utan oljud. Smörj vid behov.

### 10 Vred

Kontrollera.

### 11 Framgafflar

Kontrollera att infästning och lager inte glappar och att de snurrar lätt. Framgafflarna ska smörjas.

### 12 Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att justera i höjd.

### 13 Bromsar

Kontrollera att vårdarbromsar och ev. parkeringsbromar fungerar. Om inte, justera (se bruksanvisningen).

### 14 Ihopfällningsmekanism

Kontrollera att man enkelt kan fälla ryggrör och körbåge.

### 15 Tilt

Kontrollera att man enkelt kan tilta sättenheten. Om inte, justera (se bruksanvisningen).

### 16 Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.

### **Observera!**

Vid byte av delar på hjälpmedlet ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.